


## **INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRA PARA PRUEBA DE ADN PARA ANALISIS DE PATERNIDAD**

El estuche que acaba usted de recibir contiene dos dispositivos de toma de muestra también conocidos como Omni Swab, especialmente diseñados para la recolección de muestras de células bucales para pruebas de ADN. Para obtener una muestra de células bucales la punta del Omni Swab se frota contra el interior de la mejilla. A diferencia de los hisopos de algodón, los Omni Swab están fabricados con un material absorbente especialmente diseñado para la recolección de células bucales. Estos dispositivos se utilizan una sola vez y tienen una punta de recolección que se desprende para facilitar el proceso de toma de muestra. Aunque la recolección de muestras bucales es rápida, sencilla e indolora, debe de realizarse correctamente:

### **RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA.**

La persona que provee la muestra de células bucales no debe de haber comido o bebido inmediatamente antes de la recolección. Se sugiere que la toma de muestra se realice en ayunas por la mañana, antes de la ingestión de cualquier alimento y sin realizar aseo bucal.

1. Abra el paquete del Omni Swab por el extremo del mango y cuidadosamente saque el dispositivo del empaque. Tenga cuidado de no tocar con las manos la punta acolchonada del Omni Swab.
2. Sosteniendo el Omni Swab por el mango, raspe firmemente la punta acolchonada del dispositivo contra el interior de la mejilla de 5 a 6 veces (aproximadamente 10 segundos). Tenga cuidado de no presionar el botón que se encuentra en el extremo del mango el cual separa la punta acolchonada.
3. Tras haber tomado la muestra, introduzca la punta acolchonada del dispositivo en el tubo correspondiente y sepárela presionando firmemente el botón en la punta del mango.
4. Tape el tubo firmemente y escriba en la etiqueta del tubo el nombre de la persona a la que se le tomó la muestra.

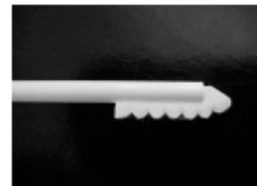

### **Almacenamiento:**

Tras la recolección de la muestra la punta acolchonada puede permanecer a temperatura ambiente durante 2 días. Si requiere almacenar la muestra durante más tiempo manténgala en el congelador.

Nota: Es necesario enviar los formatos debidamente llenos, así como la documentación completa según sea el caso.

**Envíe las muestras junto con su comprobante de pago y los formatos debidamente llenos, así como la documentación requerida a:**

**BIMODI, Biología Molecular Diagnóstica  
Prolongación Corregidora Norte. No. 1088 Primer Piso  
Col. Arboledas C. P. 76140  
Querétaro, Qro.  
MEXICO  
Tel. (442) 2 45 07 17**